



EINSATZMERKBLATT

Verwendung von Mund-Nase-Schutz (MNS) / FFP-Masken

Bei Verwendung von Mund-Nase-Schutz/ FFP-Masken im Einsatzdienst beachten:

- Möglichst zertifizierte FFP-Masken verwenden (mind. FFP2, besser FFP3)
- Priorität haben hierbei Einsatzkräfte die unvermeidbar an Patienten arbeiten
- Herstellerangaben/Gebrauchsanweisung beachten!
- Auf Passform/korrekten Sitz achten > dicht anliegend
- MNS / FFP-Maske darf während dem Tragen nicht verrutschen!
- Beim Ablegen die Kontamination im Gesichtsbereich verhindern!
- Bei (vermuteter) Kontamination oder Durchfeuchtung im Einsatz: sofortiger Wechsel!

Nicht zertifizierter Mund-Nase-Schutz:

- Vornehmlich Fremdschutz (reduziert das Risiko einer Ansteckung Anderer durch den Träger des MNS)
- Bisher keine Belege für Eigenschutz
- Zu verwenden, wenn nichts Anderes zur Verfügung steht

Arbeit am Patient auch mit Schutzmaske möglichst nur Rettungsdienst!

- Bei notwendiger Arbeit an Patient mit Verdacht auf Corona-Infektion zwingend FFP3-Maske verwenden!
- Patienten ggf. sofort MNS aufsetzen lassen
- Verwendung von geschlossener Schutzbrille oder Gesichtsschutz

Wiederverwendung:

- Nur bei personalisierten MNS/ FFP-Masken!
- Lagerung trocken an der Luft, nicht in geschlossenen Behältern!
- Kontamination der Innenseite und Verschleppung auf andere Oberflächen verhindern!

**Auch beim Tragen von MNS / FFP-Masken
allgemeine Hygieneregeln konsequent einhalten!**

Weitere Informationen sind zu finden unter:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html